



- **Numele Produsului: OrCam MyEye Pro 2**
- **Data Emiterii / Reviziei: 06.12.2025**
- **Producător / Furnizor: AMIT DS TECH IL SRL**
- **Descriere Generală:**
 - Este un dispozitiv asistiv portabil, bazat pe inteligența artificială, inovator, conceput pentru a oferi asistență persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere.
 - Dispune de o cameră inteligentă, ușoară și intuitivă, mică, care asigură preluarea informațiilor și transformarea lor în informație audio, în timp real. Folosirea nu necesită internet, aplicații sau alte dispozitive asociate. Manipularea dispozitivului se face folosind banda tactilă de pe dispozitiv prin culisare și atingere, de asemenea prin folosirea unor gesturi specifice și a unor comenzi vocale.
 - *Functia de baza:* citirea.
 - Citirea poate fi realizată de pe orice suprafețe tipărite sau digitale (acte, ziare, cutii, ecrane). Informația este redată în difuzorul încorporat în dispozitiv, nivelul volumului și frecvența cuvintelor se pot ajusta, citirea și redarea se realizează cu voce tare, în mod instant și discret, există posibilitatea de navigare în text, smart reading, pauza în citire. Citirea se poate realiza în mod automat (prin setarea detecției automate a textului) sau manual prin comenzile pe banda tactilă sau gesturi. Detecția limbii de citire poate fi

automata, dispozitivul detectand automat limba textului dintre una din cele 3 limbi presetate, sau poate citi doar o anumita limba prestabilita. Schimbarea limbii de citire presupune schimbarea vocii folosite in mod automat. In Romania vocea folosita este IOANA.

- Textele nu sunt memorate in dispozitiv, odata cu parcurgerea lor sau intreruperea citirii ele se sterg automat.
-
- *Functii suplimentare:* 1/recunoaste fete si memoreaza pana la 100 de fete cu posibilitate de inlocuire, 2/ memorare produse, 3/ identificare bancnote lei/euro/usd, 4/ identificare ora exacta, data, fara a avea un ceas pe mana, 5/ identificare culori, 6/identificare anumite obiecte din jur*. Este de sine statator, nu necesita conexiune la internet sau telefon mobil, fără fir.
- *functie disponibila doar in cazul folosirii limbii sistem engleza (comenzi limba engleza)
- Se montează cu ajutorul unei monturi magnetice pe rama oricaror ochelari, ochelarii au rol doar de suport.
- Se încarca la orice priza, calculator, chiar baterie externa cu ajutorul cablului USB, bateria are o autonomie de aprox. 90 minute, reincarcarea se face in aprox. 55minute, prelungirea duratei de utilizare continua se poate face pana la 4 ore, cu ajutorul unei baterii externe.
- Dispozitivul este setat in 3 limbi de folosinta - romana, maghiara, engleza, una din limbi poate fi ulterior schimbata la solicitare. Sunt disponibile 28 de limbi (germana, franceza, spaniola, italiana, etc.).
- Accesorii incluse: ochelari de suport cu magneti suplimentari, monturi magnetice suplimentare, adaptor magnetici inclusi, casti bluetooth, baterie externa, suport dispozitiv pentru utilizare statica, rezerve adaptor incarcare, snur mentinere dispozitiv, etui.
-
-

- **Specificații Tehnice Detaliat:** Aceasta este inima fișei tehnice și variază cel mai mult.

- descriere tehnica

- Dimensiune și greutate: 22.5 gr/0.79 oz/ 76*21*15mm
Dispozitiv+cutie: 553 gr/19.5 oz 76 x 21 x 14.9 mm/3 x 0.83 x 0.59 in
Putere: 3.7VDC
Baterie: 320mAH nominal
Camera: 13Megapixels

Dispozitivul OrCam este proiectat pentru a funcționa la temperaturi ambiante cuprinse între 0°C și 40°C (32°F și 104°F) și în condiții normale (umiditate relativă între 10% și 90% RH și o presiune atmosferică de până la 2000 m deasupra nivelului mării (700 hPa)).

Dispozitivul se poate deteriora în cazul în care este utilizat în afara acestor valori. Transportați și depozitați dispozitivul într-un spațiu răcoros și uscat (0°C și 40°C (32°F și 104°F)), cu o umiditate relativă între 5% și 90% și o presiune atmosferică cuprinsă între 700 hPa și 1060 hPa. Dispozitivul OrCam este rezistent la apă, însă nu este impermeabil. Acest lucru înseamnă că dispozitivul poate rezista la ploaie ușoară sau burniță pe perioade scurte, deși acest lucru nu se recomandă. Nu utilizați dispozitivul OrCam în caz de ploi torențiale, atunci când vă aflați la plajă sau la piscină sau atunci când vă aflați în apropierea unei căzi de baie sau a unui duș. Nu scufundați dispozitivul OrCam în niciun tip de lichid. Cod IP: IP22.

Conformitate FCC.

Acest echipament a fost testat și respectă limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor prejudiciabile în cadrul unei instalații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare cu comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există garanții că interferențele nu vor apărea într-o instalație specifică. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare cu recepțiile radio sau TV, care pot fi determinate pornind și oprind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferențele prin luarea măsurilor de mai jos:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- **Standarde și Certificări:**

- Respectarea standardelor internaționale : ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE

- **Instrucțiuni de Utilizare / Instalare (pe scurt): conform manual de utilizare**

- **Informații Logistice și de Ambalare:**

- Tipul de ambalaj- carton, polistiren
- Dimensiuni și greutate per ambalaj -500gr

- **Informații Suplimentare:**

- **Accesorii Compatibile:** Lista accesoriilor recomandate sau necesare.
- **Informații de Garanție:** Perioada de garanție și condițiile generale.
- **Suport Tehnic / Contact:** 0365.800.801, luni- vineri 9.00-18.00, str. Calarasilor nr.51, contact@orcamromania.ro, www.orcamromania.ro