

OrCam **Read.**
TRANSFORM THE WAY YOU READ.

© 2022 OrCam Technologies Ltd. Toate drepturile rezervate.

OrCam® este marca comercială și denumirea comercială a companiei OrCam Technologies Ltd. („OrCam”), iar OrCam este proprietarul unic al tuturor drepturilor și al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală cuprinse în prezentul manual și/sau în orice alt document asociat elaborat de OrCam. Documentele sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală, incluzând, dar fără a se limita la drepturile de autor, brevetele, brevetele de design, mărcile comerciale, know how-ul, secretele comerciale și tratatele internaționale. Nicio licență sau niciun drept nu este transferat(ă) utilizatorului acestui manual, manualul rămânând proprietatea unică și exclusivă a OrCam. Nicio secțiune din prezentul manual nu va fi utilizată, reprodusă, tradusă, convertită, modificată, adaptată, afișată, stocată într-un sistem de regăsire, comunicată sau transmisă prin niciun mijloc, în niciun scop comercial, incluzând, fără limitare, vânzarea, revânzarea, reproducerea, licențierea sau închirierea, fără acordul scris din partea OrCam.

O listă a brevetelor OrCam poate fi găsită la adresa <https://www.orcam.com/en-us/patent>. OrCam nu acordă nicio declarație sau garanție expresă sau implicită în legătură cu acuratețea sau caracterul complet al conținutului prezentului manual, care este pus la dispoziție „ca atare” și nu își asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru erorile sau

inexactitățile care pot apărea în prezentul document sau pentru produsele care pot fi puse la dispoziție împreună cu acest document.

Dispozitivele OrCam sunt destinate îmbunătățirii vieții de zi cu zi a persoanelor cu deficiențe de vedere, ajutându-le să studieze, să lucreze, să socializeze, să navigheze și să experimenteze lumea din jurul lor. Dispozitivele OrCam contribuie la îmbunătățirea calității vieții acestora, oferindu-le accesibilitate și independență sporite. Acestea nu înlocuiesc metodele sau formele de asistență existente și nu trebuie să se apeleze la acestea în împrejurări care pot pune în pericol viața sau sănătatea sau care ar putea conduce la pierderi financiare. Dispozitivele OrCam nu trebuie utilizate niciodată în timpul conducerii autovehiculelor sau în timpul operării utilajelor grele. Consultați site-ul OrCam, pentru informații suplimentare privind siguranța: www.orcam.com/safety.

Pentru a contacta departamentul de asistență OrCam, trimiteți un e-mail la adresa support.email@orcam.com.

Pentru manualul online al utilizatorului și pentru tutoriale video sau pentru indicații, sfaturi și asistență la depanare, vizitați: <https://knowledgebase.orcam.com/knowledge>.

    | www.orcam.com | info@orcam.com

Sediul social

OrCam Technologies
3 Kiryat HaMada St.
Ierusalim 9777513
Israel
+972.2.591.7800

**Statele Unite ale Americii
și Canada**

OrCam Inc.
1115 Broadway, 11th floor
New York, NY 10010
1.800.713.3741



Conform CE



Dispozitiv
medical

Germania

OrCam GmbH
c/o Regus Waidmarkt Cologne
Waidmarkt 11/4
50676 Köln
+49 (0) 211 540 138 11

Regatul Unit

OrCam UK. Ltd.
Regus - Heathrow Bath Road
450 Bath Rd
London UB7 0EB
+44(20)304-82937



Înainte de a utiliza dispozitivul OrCam Read pentru prima dată și pentru a asigura o utilizare sigură și corectă, vizitați site-ul nostru web la **<https://knowledgebase.orcam.com/knowledge>** pentru a accesa manualul de utilizare OrCam Read, tutoriale video, indicații, sfaturi, declarații CEM și asistență în detaliu.

Cuprins.

Asistență.	214
Ce se află în cutie?	215
Componente și butoane.	216
Introducere.	217
Încărcarea OrCam Read.	
Pornirea OrCam Read.	

Funcții.	218
Apăsarea butonului de declanșare.	
Apăsarea unui buton de volum.	
Personalizare și conectare.	218
Conectare la WiFi și actualizări de software.	
Siguranță și avertizări.	219

Termeni și condiții.	220
Confidențialitate.	
Garanție.	
Politica de rambursare.	
Conformitate FCC.	
Avertisment FCC.	

Asistență.



Trimiterea unui caz de asistență.

Dacă întâmpinați probleme, puteți trimite un caz de asistență accesând următorul link sau utilizând codul QR din partea stângă.

SUA/Regatul Unit: <https://www.orcam.com/en-us/submit-case>

Germania: <https://www.orcam.com/de-de/submit-case2>

Franța: <https://www.orcam.com/fr-fr/submit-case>

Contactați asistența.

Ne puteți contacta direct, prin următoarele metode.

E-mail.

support.email@orcam.com

Telefon.

SUA/Canada: +1-800-713-3741



Regatul Unit și Irlanda: +44(20)304-82937

Germania: +49-211-540-138-11


Franța: +33-800-903921

Ce se află în cutie?

1. Dispozitivul OrCam Read **2.** Ghid de utilizare rapidă **3.** Încărcător de perete
4. Cablu de încărcare **5.** Căști **6.** Șnur **7.** Lavetă de curățare **8.** Etui

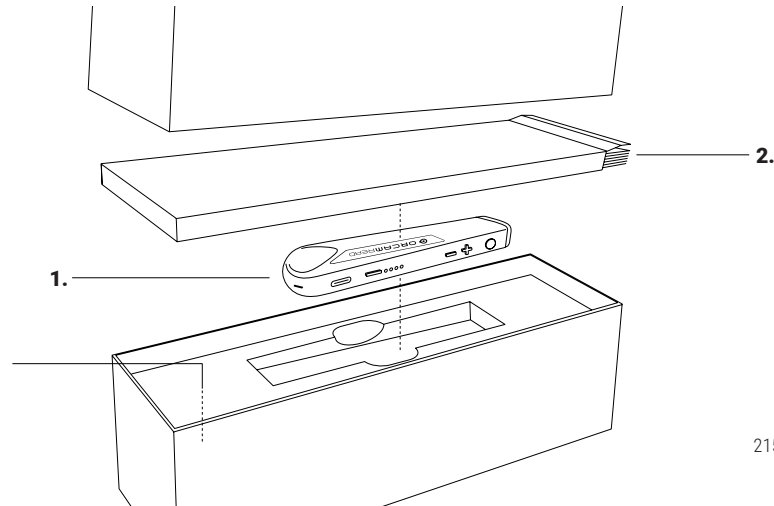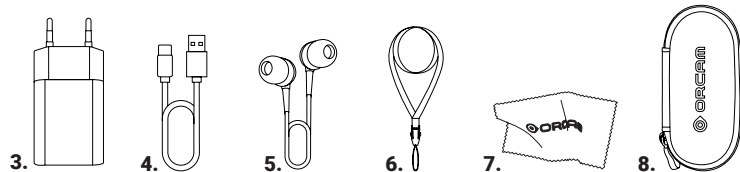

Componente și butoane.

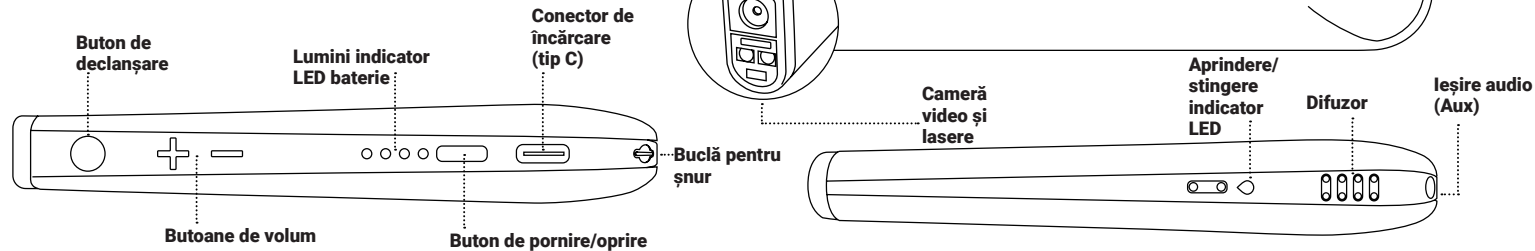

Introducere.


Încărcarea OrCam Read.

- Pentru a încărca OrCam Read, introduceți cablul de încărcare în orificiul de încărcare. Conectați capătul USB al cablului de încărcare la încărcătorul de perete. Conectați încărcătorul de perete la o priză electrică.
- Înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată, încărcați-l timp de trei ore.
- OrCam Read se încarcă complet în aproximativ 90-120 de minute.
- Încărcătorul OrCam Read acceptă 100-240 V, 50/60 Hz.


Pornirea OrCam Read.

Apăsați butonul de pornire/oprire timp de 2 secunde, până când auziți un semnal sonor. Mai puțin de un minut mai târziu, dispozitivul va anunța: „*OrCam versiunea [xx] este pregătit.* Bateria este încărcată la [XX] la sută”.
Pentru a opri dispozitivul, faceți dublu clic pe butonul de pornire/oprire.

Încărcare

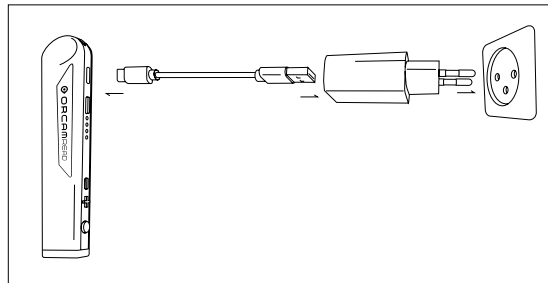

Pornire

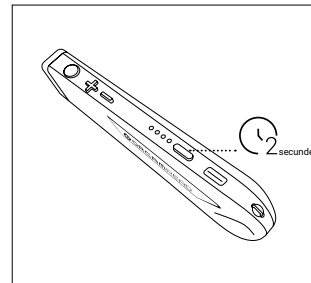

Funcții.

Apăsarea butonului de declanșare.

Apăsați o dată butonul de declanșare, iar OrCam Read va citi textul capturat, va recunoaște codurile de bare sau bancnotele, va opri citirea sau va face selecții în meniul de setări audio.



Apăsarea unui buton de volum.

Apăsați oricare dintre butoanele de volum pentru a regla volumul, pentru a derula rapid înapoi sau înainte prin text sau pentru a parcurge meniul de setări audio.



Conectare la WiFi și actualizări de software.

Conectarea OrCam Read la o rețea WiFi asigură instalarea de dispozitivul dvs. a celor mai recente actualizări de software. Dispozitivul trebuie să fie conectat la încărcător pe toată durata procesului de descărcare. Vă rugăm să rețineți că OrCam Read este compatibil cu WiFi de 2,4 GHz, iar OrCam Read 3 este compatibil și cu WiFi de 5 GHz.

Pentru a afla cum să vă conectați la Wi-Fi, accesați orcaml.com

Siguranță și avertisment.

Înainte de a vă utiliza dispozitivul OrCam, citiți cu atenție aceste precauții, pentru a evita situațiile periculoase și pentru a asigura performanța optimă a dispozitivului.

- Manipulați cu atenție dispozitivul OrCam. Acesta se poate deteriora în cazul în care este scăpat jos, ars, fisurat sau strivit.
- Verificați ca dispozitivul OrCam să nu prezinte deteriorări fizice, cum ar fi crăpături sau lovituri în carcasa exterioară a dispozitivului. Nu deschideți carcasa exterioară a dispozitivului.
- Verificați ca obiectivul camerei dispozitivului OrCam să nu fie crăpat, deteriorat sau zgâriat.
- Confirmați că obiectivul camerei nu este acoperit sau murdar. Citiți instrucțiunile de curățare de mai jos, pentru a ști cum să vă curățați corect dispozitivul OrCam.
- Utilizați doar încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul OrCam. Utilizarea altui încărcător poate anula garanția și vă poate provoca vătămări corporale grave sau vă poate deteriora semnificativ dispozitivul OrCam.
- Verificați ca încărcătorul de perete și cablul de încărcare să nu fie deteriorate sau rupte.
- Nu încercați să înlocuiți bateria; aceasta se poate defecta, fapt care poate conduce la supraîncălzire sau chiar la accidentare. Bateria este destinată să dureze doi ani la utilizare medie (un ciclu de încărcare pe zi, în medie) după care poate fi nevoie să o înlocuiți.
- Dispozitivul OrCam este proiectat pentru a funcționa la temperaturi ambiante cuprinse între 32 °F și 104 °F (0 °C și 40 °C) și în condiții normale (umiditate relativă între 10% și 90% UR și o presiune atmosferică de până la 2000 m deasupra nivelului mării (700 hPa)). Dispozitivul se poate deteriora în cazul în care este utilizat în afara acestui interval. Depozitați și transportați

într-un spațiu răcoros și uscat (32 °F până la 104 °F (0 °C până la 40 °C) și cu o umiditate relativă între 5% și 90% și o presiune atmosferică cuprinsă între 700 hPa și 1060 hPa). Dacă dispozitivul OrCam se supraîncăleşte, dispozitivul OrCam va efectua procedura de oprire.

- Dispozitivul OrCam este rezistent apă, însă nu este impermeabil. Acest lucru înseamnă că dispozitivul poate rezista la ploaie ușoară sau burniță pe perioade scurte, deși acest lucru nu se recomandă. Nu utilizați dispozitivul OrCam în caz de ploi torențiale, atunci când vă aflați la plajă sau aproape de piscină sau atunci când vă aflați în apropierea unei căzi de baie sau unui duș. Nu scufundați dispozitivul OrCam în niciun tip de lichid. Dispozitivul OrCam îndeplinește standardele Codului IP: IP22.
- Nu forțați niciun conector în porturi sau nu aplicați presiune excesivă pe un buton. Aceste acțiuni pot provoca defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție. În cazul în care un conector nu poate fi introdus cu ușurință, verificați dacă există obstrucții în port și dacă în portul respectiv este introdus conectorul corect. Nu combinați dispozitivul cu software, hardware sau alte echipamente care nu sunt furnizate de OrCam. Expunerea dispozitivului la câmpuri magnetice poate deteriora unitatea sau poate conduce la ștergerea datelor.
- Atunci când utilizați dispozitivul OrCam sau când încărcați bateria, este normal ca dispozitivul să se încălzească. În cazul în care unitatea se încălzește excesiv, prezintă scurgeri sau un miros de fum, opriți imediat dispozitivul și contactați departamentul de asistență OrCam.
- Dacă întâmpinați probleme de funcționare a dispozitivului OrCam sau dacă dispozitivul sau oricare dintre componentele sale, cum ar fi obiectivul camerei, carcasa exterioară sau încărcătorul se deteriorează sau nu mai funcționează, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență OrCam și să nu încercați să îl reparați singur. Doar personalul OrCam calificat poate

repara dispozitivul. Reparațiile neautorizate pot anula garanția.

- OrCam recomandă ca utilizatorul să stea departe de zgomotul de fond, pentru a auzi mai bine dispozitivul OrCam. OrCam recomandă ca utilizatorul să folosească un dispozitiv audio Bluetooth, cum ar fi căștile, pentru a auzi mai bine dispozitivul OrCam în medii zgomotoase.
- Dacă aveți întrebări cu privire la un stimulator cardiac intern și/sau la un defibrilator intern și/sau la un implant cohlear, vă rugăm să vă consultați cu medicul curant.
- Contactați imediat medicul în cazul în care manifestați o reacție alergică la oricare dintre elementele dispozitivului OrCam.
- Nu vă utilizați dispozitivul OrCam pentru a citi etichetele medicamentelor.
- OrCam Read îndeplinește cerințele standard din SUA și din UE pentru dispozitivele medicale clasa 1.
- **Nu priviți fix în fasciculul laser.**

Curățare.

Curățați-vă dispozitivul OrCam în cazul în care considerați că este murdar sau că a fost transferat între utilizatori. OrCam recomandă curățarea dispozitivului OrCam cel puțin o dată la două săptămâni, în special curățarea obiectivului camerei. Nu apăsați niciodată obiectivul camerei video cu degetul. Curățați obiectivul doar cu pânza din microfibre și cu soluția de curățare pentru ochelari furnizate. Nu utilizați materiale abrazive, deoarece aceasta poate deteriora dispozitivul OrCam. Nu expuneți dispozitivul la substanțe chimice, precum produse de curățare pentru uz casnic, spray-uri cu aerosoli, solventi, alcool sau amoniac, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul OrCam.

Termeni și condiții.

Prezentele Clauze și Condiții disponibile la [orcam.com/en-us/orcam-products-terms-conditions](https://www.orcam.com/en-us/orcam-products-terms-conditions) guvernează utilizarea dispozitivului OrCam („Produsul”) de către dvs. Acordul dumneavoastră în legătură cu prezentele Clauze și Condiții reprezintă o condiție pentru utilizarea Produsului.

Parcurgeți integral Manualul de utilizare, inclusiv instrucțiunile importante de siguranță, înainte de a utiliza dispozitivul OrCam. Nu utilizați dispozitivul OrCam decât după ce ați fost instruit personal sau online prin intermediul unui program de instruire autorizat OrCam Trainer™ sau OrCam.

OrCam nu își asumă răspunderea în cazul în care Produsul a fost utilizat în alt mod decât cel specificat în instrucțiunile cuprinse în Manualul de utilizare. Produsele nu trebuie utilizate în circumstanțe care pot pune viața sau sănătatea în pericol sau care pot conduce la pierderi financiare. Dispozitivele OrCam nu trebuie utilizate niciodată în timpul conducerii autovehiculelor sau în timpul operării utilajelor grele. OrCam nu își asumă răspunderea în cazul în care Produsele sunt utilizate în aceste situații.

OrCam poate primi informații de la terțe părți (adică codurile de bare ale produselor alimentare din anumite țări). OrCam primește informațiile Codurilor de bare ale produselor alimentare din Australia și Noua Zeelandă de la GS1 Australia. OrCam nu își asumă răspunderea pentru precizia informațiilor obținute de la terțe părți.

Confidențialitate.

OrCam acordă o deosebită atenție asigurării confidențialității dvs. și ne angajăm să protejăm și să securizăm informațiile cu caracter personal ale clienților și utilizatorilor noștri. Vă rugăm să citiți

Politica noastră de confidențialitate, care se găsește la <https://www.orcam.com/en-us/orcam-products-privacy-statement/> și care descrie modul în care prelucrăm datele cu caracter personal referitoare la clienții și la utilizatorii noștri în legătură cu serviciile furnizate de noi, site-ul nostru web și aplicația mobilă OrCam Read (denumite „Serviciile” și, respectiv, „Aplicația”); tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm; scopurile în care folosim și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal; modul în care sunt protejate datele dvs. cu caracter personal; și cu cine pot fi partajate datele dvs. cu caracter personal.

Este important pentru noi să vă permitem să înțelegeți politica noastră privind confidențialitatea și drepturile dvs. în legătură cu datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. De asemenea, trebuie să știți că folosim module cookie și tehnologii asemănătoare pentru a colecta și a salva informații atunci când ne accesați site-ul web, disponibil la adresa www.orcam.com, pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experiență posibilă. Pentru a afla mai multe despre utilizarea unor astfel de tehnologii, vă rugăm să ne consultați Politica noastră privind modulele cookie de la adresa <https://www.orcam.com/en/cookies-policy/>.

Dacă simțiți că o preocupare pe care o aveți în legătură cu confidențialitatea dvs. nu a fost abordată de Declarația privind confidențialitatea, vă rugăm să ne contactați la adresa: privacy@orcam.com și să ne informați.

Dacă alegeți să descărcați Aplicația sau să utilizați Serviciile, să interacționați cu acestea, să vă înregistrați sau să ne furnizați date în legătură cu acestea, sunteți de acord în mod explicit cu utilizarea unor astfel de date în conformitate cu prezenta Declarație privind confidențialitatea. Nu puteți utiliza Serviciile sau nu ne puteți trimite date dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii de mai jos. Prezenta Declarație privind confidențialitate nu va fi interpretată în niciun fel

ca derogând de la Termenii noștri și Condițiile noastre sau de la orice alt acord încheiat de OrCam și de dvs. și între OrCam și dvs.

Garanție.

Clientul confirmă că, cu excepția dispozițiilor explicite menționate în prezentul document, OrCam nu face nicio declarație și nu acordă nicio garanție Clientului în legătură cu Produsul, cu funcțiile acestuia sau cu orice imagini produse de acesta.

Garanția limitată privind produsul acordată de OrCam utilizatorului final („Garanția limitată”) asigură deținătorul unui produs OrCam împotriva oricăror defecte de material sau de fabricație la momentul achiziției inițiale, pe o perioadă ulterioară de un (1) an și pe orice perioadă de garanție legală suplimentară aplicabilă. Dovada originală de achiziție/livrare este necesară din partea deținătorului pentru a beneficia de această garanție.

OrCam va repara sau va înlocui, la alegerea sa, orice produs care, conform companiei OrCam, face obiectul prezentei Garanții Limitate. OrCam nu este responsabil pentru condițiile rezultate ca urmare a deteriorării intenționate sau utilizării incorecte a produsului. Deținătorul este responsabil pentru costurile de expediere a produsului în locația specificată de OrCam.

Prezenta Garanție Limitată constituie garanția unică și exclusivă aplicabilă produselor OrCam. Niciun terț nu are dreptul de a face declarații, de a acorda garanții sau de a încheia acorduri în numele OrCam în legătură cu produsele OrCam. OrCam nu acordă niciun altfel de garanție, cu excepția celor menționate în mod expres în prezentul document.

OrCam nu este responsabilă în nicio situație pentru daunele speciale, colaterale, indirecte, punitive, incidentale, subsidiare sau exemplare în legătură cu utilizarea produsului sau rezultate din aceasta. În niciun caz răspunderea OrCam nu va depăși prețul plătit pentru produs.

Fără a limita niciuna dintre dispozițiile privind limitarea răspunderii din prezentul contract, garanția limitată stabilită nu se aplică, iar proprietarul va plăti companiei OrCam orice costuri și cheltuieli suportate în cazul în care:

- (i) produsul nu a fost folosit în conformitate cu documentația produsului și cu condițiile de utilizare sau cu instrucțiunile de utilizare scrise puse la dispoziție de OrCam;
- (ii) produsul a fost alterat, utilizat incorect sau neglijent sau deteriorat accidental;
- (iii) etichetele de identificare a produsului sau a componentelor sale au fost eliminate sau produsul a fost modificat prin alte mijloace;
- (iv) produsul a fost deschis, modificat, reparat, întreținut sau modificat de către o persoană care nu este reprezentant OrCam autorizat;
- (v) produsul a fost combinat cu software, hardware sau alte echipamente care nu sunt furnizate de OrCam sau care nu sunt aprobate în scris de către un reprezentant OrCam autorizat;
- (vi) produsul a fost deteriorat în mod intenționat sau a fost expus la apă, căldură sau tensiuni înalte;
- (vii) produsul a fost utilizat de către o persoană care nu a finalizat instruirea prin intermediul unui program OrCam Trainer™ autorizat.

Orice componente aflate în perioada de garanție vor rămâne în garanție pentru perioada rămasă din garanția originală sau timp de nouăzeci (90) de zile de la data reparației, oricare dintre aceste perioade este mai lungă.

Pentru a vă înregistra dispozitivul pentru garanție, vă rugăm să vizitați site-ul web de înregistrare a garanției.

În cazul în care considerați că aveți nevoie de asistență privind garanția produsului dumneavoastră, contactați support.email@orcaml.com. Dumneavoastră veți fi responsabil(ă) pentru costurile de expediere. Cu toate acestea, în cazul în care rezultă că solicitarea de utilizare a garanției este validă, OrCam va plăti costul integral al expedierii produsului reparat sau înlocuit.

ORCAM NU ACORDĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR, VANDABILITATEA ȘI CARACTERUL ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. ORCAM NU GARANTEAZĂ CĂ PRODUSUL NU VA CONȚINE ERORI SAU DEFECȚIUNI, CĂ VA FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERE, CĂ ORICE IMAGINI SAU SUNETE PRODUSE DE PRODUS VOR FI EXACTE SAU CĂ FUNCȚIONAREA PRODUSULUI VA FI SIGURĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ACESTE. ACEASTĂ SECȚIUNE SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.

Politica de rambursare.

Vă puteți returna dispozitivul nedeteriorat pentru a solicita rambursarea în perioada stabilită în legislația locală sau după cum s-a convenit între dvs. și OrCam la momentul achiziției. Taxele de instruire nu sunt rambursabile. Contactați reprezentantul local sau departamentul de asistență OrCam pentru a iniția procesul de returnare.

Atunci când returnați dispozitivul OrCam, vă rugăm să respectați cu atenție instrucțiunile Departamentului OrCam de asistență. Dispozitivul trebuie să fie în aceeași stare în care l-ați primit și să nu fie

nedeteriorat în niciun fel. Rambursarea dvs. și modul în care este trimisă pot diferi în funcție de modul în care a fost achiziționat dispozitivul, de starea acestuia și de cât timp ați deținut dispozitivul.

OrCam vă va procesa returnul numai după ce operatorul de transport v-a primit dispozitivul și l-a livrat către OrCam. De obicei, durează până la trei săptămâni (pentru transportul internațional care implică vamă locală poate dura mai mult) până când OrCam primește și vă procesează dispozitivul returnat. După ce OrCam vă emite rambursarea, este posibil să dureze timp suplimentar pentru ca fondurile dvs. să vă fie puse la dispoziție în cont de instituția dvs. financiară. Pentru plata cu cardul de credit, aceasta poate dura între 5 și 10 zile lucrătoare.

Dacă aveți orice întrebări, nu ezitați să contactați echipa de Asistență OrCam.

Conformitate FCC.

Acest echipament a fost testat și respectă limitele pentru un dispozitiv digital clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor prejudiciabile în cadrul unei instalații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare cu comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există garanții că interferențele nu vor apărea într-o instalație specifică. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare cu recepțiile radio sau TV, care pot fi determinate pornind și opriind echipamentul, utilizatorul este încurajat să încerce să remedieze interferențele prin luarea măsurilor de mai jos:

- Reorientarea sau relocarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician radio/TV experimentat.

Acest dispozitiv respectă Secțiunea 15 din Normele FCC.

Funcționarea dispozitivului se supune următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu provoacă interferențe periculoase.
2. Acest dispozitiv poate accepta orice interferențe primite, inclusiv interferențele care pot provoca funcționarea nedorită.

Avertisment FCC.

Modificările care nu sunt aprobate în mod expres de producător pot anula autorizația utilizatorului de a folosi echipamentul conform normelor FCC.

NOTĂ: PRODUCĂTORUL NU ESTE RESPONSABIL PENTRU INTERFERENȚELE RADIO SAU TV PROVOCATE DE MODIFICĂRILE NEAUTORIZATE ALE ACESTUI ECHIPAMENT. ACESTE MODIFICĂRI POT ANULA CALITATEA UTILIZATORULUI DE A FOLOSI ECHIPAMENTUL.



Conform cu Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Contactați OrCam, pentru recomandări privind eliminarea corespunzătoare.

RoHS

Conform cu Directiva privind restricționarea substanțelor periculoase (materiale și componente)

FCC

FCC ID:
2AAWI-READ2WAY
2AAWI-READ



Consultați Ghidul de instrucțiuni de utilizare și Manualul



Echipament de clasa II în conformitate cu IEC 60536

EC

REP

Reprezentant autorizat în UE:

Arazy Group GmbH
The Squaire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main, Germania
Număr de telefon: +49 69 95932-5090

CH

REP

Reprezentant autorizat în Comunitatea elvețiană:

Arazy Group Switzerland GmbH
Bruderholzallee 53 4059, Basel, Elveția
Număr de telefon: +41 335332267

Persoană responsabilă în Regatul Unit:

MEDES LIMITED
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett,
Hertfordshire, Londra WD7 7AR, Regatul Unit
medes@arazygroup.com

Standarde aplicabile.

OrCam Read îndeplinește toate cerințele aplicabile din Regulamentul UE privind dispozitivele medicale 2017/745 și 2007/47/CEE și cerințele esențiale prevăzute în Anexa 1.

EN IEC 60601-1. EN IEC 60601-1-2. EN IEC 60601-1-6. EN IEC 60601-1-11. ETSI EN 301 489-1. ETSI EN 301 489-17. FCC Part 15, Subpart B. IEC 62366-1:2015. IEC 60825:2014. EN IEC 62304:2006. RoHS Directive 2011/65/EU. WEEE. EN ISO 14971:2016. ISO 13485:2016. ISO 20417 2021. EN ISO 15223-1:2016.



Max output of laser radiation: 0.371 mW
Emitted wavelength: 635 nm
Name of the standard: IEC 60825-1

AMIT DS TECH IL SRL – REPREZENTANT AUTORIZAT ORCAM PENTRU ROMANIA
STR. CALARASILOR NR 51
TG MURES

ADDENDUM LA MANUAL DE UTILIZARE 2022 ORCAM READ SMART

12.01.2026

In completarea manualului de utilizare eliberat de OrCam Technologies, in conformitate cu legislatia din Romania, urmatoarele clauze se adauga:

Pagina web atasata distributiei din Romania este: www.orcamromania.ro

Sediul social al distribuitorului unic din Romania: Mures, Tg Mures, str. Calarasilor nr 51, telefon 0365.800.801.

Prezentul manual este disponibil in format pdf pe www.orcamromania.ro/zonautilizator

Pentru tutoriale video consultati <https://www.orcamromania.ro/user-area/videos>.

Termeni si conditii.

Garantia oferita in Romania este de 2 ani, din momentul achizitiei, in conditiile respectarii instructiunilor de folosire din manual precum si a specificatiilor din certificatul de garantie.

In Romania nu se realizeaza reparatii pentru dispozitivele acceptate ca avand defecte de fabricatie, ci se inlocuiesc in cazul constatarii defectului conform procedurilor din manual si cetificat de garantie, inlocuirea facandu-se cu un dispozitiv NOU.

Pentru toate dispozitivele comercializate in Romania, bateriile dispozitivelor nu se inlocuiesc.

Politica de rambursare in Romania este aliniata legislatiei in vigoare, si respecta garantia de satisfactie de 14 zile, respectiv posibilitatea de returnare si restituire asa cum o prevede politica comerciala a companiei pentru Romania.

Conditiiile comerciale din Romania sunt disponibile aici <https://www.orcamromania.ro/commercial-terms>.

Asistenta clienti, recomandari, sfaturi - OrCam in Romania: 0365.800.801, contact@orcamromania.ro